



Smidig och unik ortoslösning vid HYPEREXTENSION

i kombination med DROPPFOT

ToeOFF har under många år bevisat sin plats både i rehabiliteringsprocessen men också i det dagliga livet och hjälpt många brukare med droppfot till ett bättre gående och ökad livskvalitet.

ToeOFF har ibland kombinerats med knäortoser för att motverka översträckning av knäleden. Nu finns en ortoslösning för detta som direkt kombineras med ToeOFF eller BlueRocker.

COMBO

en produkt i ToeOFF-Familjen

Vid behandling av patienter med olika typer av nerv- och muskelsjukdomar som stroke, post polio, olika neurologiska sjukdomar samt CMT ser man ibland skador som t.ex. bestående droppfot. Allt eftersom musklerna försvagas kan andra problem uppkomma. Ett av dessa är genu recurvatum, dvs översträckning av knäleden. Översträckningen av knäleden ger ökad påfrestning i bakre ledkapseln och ökad belastning på de posteriora delarna av ledytorna vilket kan leda till smärta både i stillastående och vid gång. Obalans mellan böj- och sträckmuskler i kombination med översträckning, instabilitet och muskelstramhet kan påverka gånghastighet, steglängd och gångsträcka. Det asymmetriska gångmönstret kan ge upphov till andra problem i leder och muskler.

- Skenorna formas enkelt och anpassas till patientens längd
- Olika storlekar kan kombineras för lår och vad
- Smidig
- Låg vikt
- Enkel att ta på och av
- Enkelt att enbart ta av lårdelen när så behövs



Combo-ortosen anpassas individuellt till varje patient. De olika komponenterna kan kombineras beroende av patientens storlek och längd.

- Val av storlek på lårdelen är beroende av hur högt upp på låret denna placeras. Den kan dock inte placeras lägre än ca 10 cm ovan Tibia Platån.
- Val av storlek för kopplingsdelen är helt beroende av vilken storlek som används av ToeOFF eller BlueRocker.
- Val av storlek på Hyperextensionskrysset bestäms av knävidden.
- Samtliga fem artiklar behöver beställas för att erhålla en komplett ortos.
- Combo är ej avsedd för patienter med vikt > 150 kg, längd > 2 m.

COMBO

en produkt i ToeOFF-Familjen

Art.nr.	Benämning	Storlek	Vä/Hö	Omkrets*	M-L*
28780 0000	Ortosknäleder med skenor	En storlek			
28781 1011	Lårdel	Small	Vänster	30 - 40 cm	11 - 15 cm
28781 1012	Lårdel	Medium	Vänster	38 - 50 cm	13 - 17 cm
28781 1013	Lårdel	Large	Vänster	48 - 60 cm	15 - 19 cm
28781 1014	Lårdel	XLarge	Vänster	58 - 70 cm	17 - 21 cm
28781 2011	Lårdel	Small	Höger	30 - 40 cm	11 - 15 cm
28781 2012	Lårdel	Medium	Höger	38 - 50 cm	13 - 17 cm
28781 2013	Lårdel	Large	Höger	48 - 60 cm	15 - 19 cm
28781 2014	Lårdel	XLarge	Höger	58 - 70 cm	17 - 21 cm
28782 0011	Hyperextensionskryss	Small			70 - 105 mm**
28782 0012	Hyperextensionskryss	Medium			95 - 130 mm**
28782 0013	Hyperextensionskryss	Large			125 - 160 mm**
28783 0011	SoftKIT till 28781 fp. om 2 st	Small			
28783 0012	SoftKIT till 28781 fp. om 2 st	Medium			
28783 0013	SoftKIT till 28781 fp. om 2 st	Large			
28783 0014	SoftKIT till 28781 fp. om 2 st	XLarge			
28784 0011	Tibia koppling	Small	Välj storlek i förhållande till ToeOFF/BlueRocker		
28784 0012	Tibia koppling	Medium			
28784 0013	Tibia koppling	Large			

*20 cm ovan mid-patella **knävidd